

HELPie®

Uusi suomalainen keksintö
hammashuollon avuksi:
Purutuki-kielenpidin-syljenimu
HELPie®
Käyttö ja käyttöönotto on
helppoa!



1. Liitä HELPien imuputken reikään paketissa tuleva HELPien oma adapteriletku.

2. Liitä adapteriletku syljenimuun. Letku sopii yleisimpiin imuadaptereihin. Imu päälle ja HELPie on käyttövalmis.



3. Pyydä potilasta avaamaan suuta kerran-kaksi isolle auki niin, että poskilihakset hieman venyvät. Tämä helpottaa HELPien suuhun laittamista.

4. Vie HELPie suuhun; purutuki viedään niin taakse kuin se potilaan suun avaukseen nähden on sopiva. HELPien asentoa voi säädellä potilaan suun mukaan kallistamalla HELPieitä ylös-alassuunnassa ja hieman sivuttaisesti oikealle ja vasemmalle. Potilas voi itse hakea hänelle sopivan asemoinnin.



5. HELPie takaa hyvän työskentelytilan, estää kielen pääsyn työskentelyalueelle ja imee nesteen suusta mahdollistaen molaarialueen pysymisen kuivana.