

Jännittääkö? Huolestuttaako?

Käytämme uutta suomalaista HELPie-hoitovälinettä tehdäksemme käynnistäsi mahdollisimman miellyttävän.

Näin se toimii:

Leukojesi levoksi – purutuki

1. Rentouta aluksi poski-
lihakset avaamalla suusi pari
kertaa oikein suureksi. Tämä
auttaa hammaslääkäriäsi
asettamaan HELPien vaivat-
tomasti ylä- ja alahampaidesi
väliin. Voit itsekkin säätää hoi-
tovälineen paikkaa, jotta se
tuntuu varmasti miellyttävältä
ja tukevalta.

Purutuki auttaa suutasi
pysymään levollisesti auki
minimoiden hoidon jälkeisen
lihaskivun.

Suojapaikka kielellesi

2. Kun hoitoväline on paikal-
laan, kielesi asettuu itses-
tään sille varattuun suojaan.
Siksi sinun ei tarvitse hoidon
aikana huolehtia kielesi liik-
keistä tai pelätä sen osumis-
ta instrumentteihin. Myös
voimakkaan makuiset aineet
pysyvät poissa makunysty-
röiltäsi.

Purutuesta ja kielisuojusta
huolimatta voit niellä aivan
normaalisti.

Nopeammin hoitotuolista

3. Toimenpiteiden aikana
saatat huomata, että suus-
sasi on nyt entistä rauhal-
lisempaa.

Purutuki, kielisuoja ja eten-
kin automaattinen syljenimu
vähentävät muiden laitteiden
tarvetta suussasi.

Sinua hoitavalle ammattilai-
selle HELPien ominaisuudet
takaavat paremman työs-
kentelytilan ja -näkyvyyden
tehostaen ja nopeuttaen
hoitotyötä.

Joustava
purutuki

Joustava
purutuki

Kielisuoja

Syljenimu